

NL HANDLEIDING

○ Dry&Clean-modus (2 uur)

De Dry&Clean-modus is een automatisch programma dat een Clean-modus is een kort reinigingsprogramma dat de geoptimaliseerde UV-Clamp start, die tot 99,9% van de ziektekiemen, met UV-Clamp aan het begin en het einde van de droogtijd voor bacteriën en schimmels die in huis aanwezig zijn elimineert. perfecte hygiëne.

○ Clean-modus (2 minuten)

De Clean-modus is een kort reinigingsprogramma dat de geoptimaliseerde UV-Clamp start, die tot 99,9% van de ziektekiemen, met UV-Clamp aan het begin en het einde van de droogtijd voor bacteriën en schimmels die in huis aanwezig zijn elimineert. perfecte hygiëne.

De eerste keer in gebruik nemen

1. Steek de USB-kabel in een USB-voeding (SV/1A) en de USB-C-stekker in de aansluiting aan de achterkant van uw dry-cap uv 3.1°.
 - Het opladen van de dry-cap uv 3.1° duurt ong. 2,5 uur; het apparaat is daarna gereed voor ong. 5 cycli in de Dry&Clean-modus of ong. 60 cycli in de Clean-modus.
2. Steek de voedingstekker vervolgens in een stopcontact.
 - Het opladen van de dry-cap uv 3.1° duurt ong. 2,5 uur; het apparaat is daarna gereed voor ong. 5 cycli in de Dry&Clean-modus of ong. 60 cycli in de Clean-modus.

① LED 3 groen knippert

① LED 3 brandt groen

○ Gebruik van de Dry&Clean-modus (2 uur)

3. Plaats de dry-cap uv 3.1° met de kap over het laadstation met de oplaadbare hoortoestellen heen.
4. Druk op de linker knop (Dry&Clean-modus), het onderhoudsprogramma (drogen + UV-C) start automatisch.
 - Het snelle droogproces met de ventilator wordt aangestuurd door een microprocessor en duurt 2 uur.
 - Ultraviolet licht (253,7 nm) elimineert binnen 2 minuten tot 99,9% van de ziektekiemen en bacteriën.
 - Na 2 minuten schakelt de UV-Clamp automatisch uit, het droogproces gaat verder.
 - Binnen de laatste 2 minuten van het 2 uur durende droogprogramma loopt een tweede UV-C-hygiëne.
 - Na 2 uur schakelt de dry-cap uv 3.1° automatisch uit in stand-by. Het drogen en de reinigingscyclus zijn klaar, de hoortoestellen worden verder opgeladen in het laadstation en kunnen onder de dry-cap uv 3.1° blijven nadat het laadstation is uitgeschakeld.
5. Til de dry-cap uv 3.1° op en zet deze naast het laadstation. Verwijder de gedroogde en hygiënisch gereinigde hoortoestellen uit het laadstation.

① LED 1 brandt

① LED 1 knippert

① LED 1 brandt

① LED 1 knippert

① LED 1 gaat uit

① LED 1 knippert

① LED 3 brandt groen

○○ Gebruik van de Clean-modus (2 minuten)

3. Plaats de dry-cap uv 3.1° met de kap over het laadstation met de oplaadbare hoortoestellen heen.
4. Druk op de rechter knop (Clean-modus), het reinigingsprogramma (UV-C) start automatisch.
 - Ultraviolet licht (253,7 nm) elimineert binnen 2 minuten tot 99,99% van de ziektekiemen en bacteriën.
 - Na 2 minuten schakelt de dry-cap uv 3.1° automatisch uit in stand-by.
5. TIJ de dry-cap uv 3.1° op en zet deze naast de producten. Verwijder de hygiënisch gereinigde producten.

- ① LED 2 knippert
- ② LED 2 gaat uit

De reiniging is klaar.

Onderhoud en bediening

Wij adviseren vochtige doekjes te gebruiken voor de reiniging van uw dry-cap uv 3.1°. Leest u alstublieft ook de instructies voor onderhoud en bediening van uw hoortoestellen en het laadstation. De dry-cap uv 3.1° is zeer energiezuinig. Het apparaat hoeft alleen te worden opgeladen wanneer de Lithium-polymeerbatterij leeg is (zie De eerste keer in gebruik nemen). ① LED 3 brandt rood. U kunt het droogproces in de Dry&Clean-modus onderbreken door de knop gedurende meer dan 3 seconden ingedrukt te houden, of door de unit op te tillen en te kantelen.

! Waarschuwingen

Vermijd contact met water! De dry-cap uv 3.1° mag niet worden gebruikt in de buurt van een gootsteen of andere vochtige plaatsen! Voorkom mechanische belasting door stoten of vallen! De dry-cap uv 3.1° mag niet worden gebruikt in de buurt van vuur of gemakkelijk ontvlambare voorwerpen! Bij storingen gaat u met het apparaat naar uw verkoper! Haal de unit niet uit elkaar! Zorg ervoor dat kinderen niet zonder toezicht bij het apparaat kunnen komen, om te voorkomen dat ze met de unit spelen! Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of zijn geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat!

LET OP: Kijk niet direct in de UV-Clamp, dit kan uw ogen en uw huid beschadigen! De dry-cap uv 3.1° heeft een 3G-veiligheidssensor. Als de dry-cap uv 3.1° wordt verplaatst, gedraaid of gekanteld tijdens gebruik, schakelt de 3G-sensor het apparaat uit. U moet het apparaat daarna opnieuw starten. Gebruik dit product alstublieft alleen voor producten die met UV-C gereinigd kunnen worden, en nooit voor mensen of dieren.

Weggoien

Dit elektronische product en de geïntegreerde Lithium-polymeerbatterij mogen uitsluitend worden weggegooid overeenkomstig de plaatselijk geldende voorschriften! Dit apparaat heeft WEEE-reg.-nr. DE 47525015 en wordt geaccepteerd als elektronisch afval bij de daartoe aangewezen inzamelpunten. Gooi het apparaat niet weg met het huishoudelijke afval!